



WERKING EN TOEPASSINGSBEREIK:

De callOne wallmount (SE-C/Wa) is het muurcontact voor een oproepeer die kan gebruikt worden in ziekenhuizen en rusthuizen om het verplegend personeel op te roepen in geval van nood of ongemakken. De oproepeer wordt via een magneetcontact met het muurcontact verbonden. Het is voldoende om de stekker van de oproepeer in de buurt van het muurcontact te brengen, opdat deze zich naar het muurcontact toe zal trekken, en verbinding maken. Er is geen specifieke oriëntatie vereist. Op de oproepeer bevinden zich 5 knoppen: oproep verpleging (grote oranje knop), 2 lichtknoppen (te configureren welke lichten in de kamer via welke knop bediend kunnen worden), screen omhoog, en screen omlaag.

LEVENSGEVAAR!



Aanraking met de elektrische installatie van de woning onder spanning (230 V AC) kan leiden tot de dood of tot heel ernstige brandwonden. Zet alle geleiders zonder spanning en controleer of de spanning echt uit is voordat u dit apparaat begint te installeren. Zorg ervoor dat het apparaat niet door derden onder spanning kan worden gezet.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:



Alleen een erkende vakman mag deze module installeren en activeren. Daarbij moet hij of zij de plaatselijke voorschriften van het land in kwestie naleven. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in droge ruimtes. Bovendien mag het niet worden gebruikt (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor doeleinden die risico's inhouden voor de gezondheid of voor doeleinden waarbij een storing van het apparaat een gevaar kan vormen voor personen, dieren of goederen.

INSTALLATIE

De callOne wallmount wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos in de muur, welke verbonden is met een bepaalde kring. Deze kring dient voorzien te zijn van een SmartOne module. Bij nieuwbouwprojecten, en bij renovatie indien mogelijk, is het aanbevolen om diepe inbouwdozen te gebruiken (61 mm).

De connecties van de callOne wallmount bevinden zich achteraan links. Enkel de voeding dient te worden aangesloten via de L en N draden. Zowel de voeding van de module, als de datacommunicatie verlopen over de 230V.

Maximum 14 callOne wallmount modules kunnen worden aangesloten op 1 SmartOne zekering. Bijkomende informatie over de indienststelling kan u terugvinden in de ONE installatie manual of op www.onesmartcontrol.com/support.

WAARBORG

ONE verzekert de perfecte werking van dit product volgens de specificaties voor een periode van 24 maanden na de levering door ONE. De waarborg vervalt bij opening van het apparaat, bij andere ingrepen op het apparaat of bij een verkeerde installatie/configuratie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Naam	CallOne Wallmount
Type aanduiding	SE-C/Wa
Nominale ingangsspanning/frequentie	230 V AC/50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W
Beschermingsklasse (droge kamers)	IP20 EN 60529
Isolatiespanning	3 kV AC
Toegelaten omgevingsvochtigheid (opslag)	-20 °C ...+70 °C
Toegelaten omgevings temperatuur (dienst)	0 °C ...+45 °C
Toegelaten omgevingsvochtigheid (dienst)	< 80 % relatieve vochtigheid,
.....	niet condenseerbaar
Gewicht zonder verpakking	+/- 0.2 kg